



Ibèrica Gràfica, s.a.

Referencia	MA562 SANORIN AQUA SW HYP 30ML
Material	OFFSET
Gramaje	50 gr
N ^a de Tintas	1+0
Especif. Tintas	NEGRO
Medidas Folleto	160x210
Medidas Plegado	160x30
EDICION	

Elaborado por	Verificado por	Aprobado por: IBERICA GRAFICA	Aprobado por: PHARMALINK
JORDI	IBERICA GRAFICA		
FECHA 30/08/16	FECHA 30/08/16	Fecha	Fecha



САНОРИН аква

ГІПЕРТОНІЧНИЙ
РОЗЧИН
СПРЕЙ
НАЗАЛЬНИЙ

ВИРІБ
МЕДИЧНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

МОРСЬКА ВОДА

Належна гігієна носової порожнини при застуді у дорослих та дітей запобігає розвитку ускладнень та прискорює одужання. Надлишок слизу сприяє розмноженню мікробів та їх розповсюдженню на різні відділи носової порожнини.

САНОРИН АКВА МОРСЬКА ВОДА – гіпертонічний розчин, який зберігає природні властивості натуральної морської води. Її забор відбувається в акваторії затоки Канкаль (Бретань, Франція). Область забору води за чистотою відноситься до «класу А» і знаходиться під постійним контролем за станом мікробіологічного та хімічного забруднення, станом фітопланктону, рівнем рН та інших показників.

САНОРИН АКВА МОРСЬКА ВОДА розріджує інфікований слиз та полегшує його видалення з порожнини носа разом з бактеріями та вірусами. Гіпертонічний розчин природним шляхом видаляє зайву рідину зі слизової оболонки носоглотки, зменшує її набряк та полегшує дихання.

САНОРИН АКВА МОРСЬКА ВОДА очищує слизову носа, зволожує її та усуває відчуття сухості та подразнення в носовій порожнині. Це покращує функції миготливого епітелію, внаслідок чого посилюється опірність слизової оболонки до проникнення бактерій і вірусів.

СКЛАД: морська вода, вода очищена.

ФОРМА ВИПУСКУ: спрей 30 мл з механічним насосом-дозатором і аплікатором. Флакон не містить газ-випусквач.

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ:

- нежиті при застуді, ГРВІ, грипі
- синуситах, у т.ч. гайморитах
- необхідності розрідження та видалення інфікованого слизу
- підготовці слизової оболонки до ЛОР-маніпуляцій
- необхідності пом'якшення та видалення корок після ЛОР-маніпуляцій
- необхідності зволоження слизової оболонки носа

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: дорослим та дітям від 6 років по 1-2 впрыскування у кожен носовий хід 3 рази на добу або більше за необхідністю.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: індивідуальна непереносимість або алергія на морську воду.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ:

- більш ніж однією особою з гігієнічних міркувань та з метою запобігання передачі патогенних мікроорганізмів іншим особам;
- після 30 днів від першого відкриття;
- після закінчення строку дії, вказаного на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: не потребує особливих умов зберігання. Рекомендовано зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: спрей не містить токсичних та тератогенних речовин. Жінкам у період вагітності та годування груддю, застосовувати, зважаючи на інформацію в «Противопоказаннях» та рекомендацію лікаря.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки.

ДАТА ОСТАНЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ: 20.07.2016.

ВИРОБЛЕНО:
Pharmalink S.L./Фармалінк С.Л.

ВИРОБНИЧІ ДІЛЬНИЦІ:
Ctra. de Valls TV-2034,
Km 6, 43886, Vilabella,
Tarragona, Spain/
Ктра. де Вальс ТВ-2034,
6 км, 43886, Вілабелла,
Таррагона, Іспанія

ШТАБ-КВАРТИРА:
Av. Universitat Autònoma, 13
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès.
Barcelona (Spain)/
Ав. Юніверсітат Аутонома, 13
Парк Текнолоджік дель Валлес
08290 Керданьяола дель Валлес.
Барселона (Іспанія)

**УПОВНОВАЖЕНИЙ
ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ:**
ТОВ «Ксантіс Фарма»
04071, Україна, м. Київ
вул. Воздвиженська, буд. 56
Тел.: +38 (044) 277-62-07
E-mail: info.ua@xantispharma.com

